

特點：輕巧、安全、無副作用、方便使用

功效 定位舒緩痛症，減輕關節腫痛

產品說明

1、光波百搭帶（型號：MuR69-4W）

尺寸（長寬厚cm）：57 x 10 x 0.4

彈性織帶尺寸：25cm、80cm

功率：4W

重量：61g

2、設計使用範圍：小至手指，大至肚臍均可；

3、面料材質：皮革或者潛水布，採用醫療物料，不損皮膚；潛水衣物料，具彈性，有污漬可抹淨。底材質：TPU醫療膠

4、輸入（DC 5V/1A）：可用充電寶（方便攜帶，移動使用）、適配器、電腦USB接口等
本產品可根據客戶需要隨貨配備1米USB接駁延長線，方便接插電腦、適配器使用。

（注：標配不含USB接駁延長線和適配器）

5、產品憑購貨發票保用1年（充電寶及USB接駁延長線除外）

光波帶經穴圖




（圖例一）



（圖例二）



（圖例三）

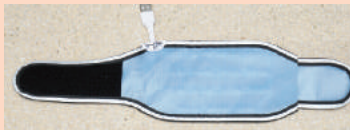

正面圖



織帶黏接效果圖



反面圖



80cm 彈性織帶



25cm 彈性織帶

使用說明:

- 1、用充電寶點亮產品時，先確認充電寶有足夠電量，防止使用中途無電。
- 2、用適配器點亮產品時，先要確保適配器安全可靠，然後用USB接駁延長線將產品連接到適配器上，再將適配器插入交流插座通電點亮產品開始使用。用適配器點亮產品適用於家中；辦公室坐著使用。
- 3、將光波帶圍在疼痛、病患處上，扣緊產品（對於不能直接扣緊的部位，可利用長短不同織帶扣緊）然後插上充電寶或者適配器點亮即可使用。
- 4、每次使用30~120分鐘（冬季及寒冷地區時間可長些），每日1~3次，視傷患程度。

注意事項

- 1、不要直射眼睛（閉上眼睛也不能直射）；
- 2、不要直照頸部甲狀腺，防止甲亢；
- 3、本光波禁照射搽上不能內服藥物患處（搽上能內服藥物的不在此列），因為此光波會把外用藥帶入體內，會產生人體其他部位不良作用；
- 4、小孩要在成年人陪同下使用，孕婦要在醫生指導下使用；
- 5、夏天或熱帶地區，使用紅光產品時溫度會熱些，隔著內衣褲或不要蓋上外衣及被單使用較好，以免溫度太高（不同人對熱度接受程度不同）。使用產品時避免睡著，可能會燙傷皮膚；
- 6、本產品屬於電子產品，不可放入水中清洗，燈面如有污漬可用酒精擦拭；
- 7、紅光極少人會敏感，皮膚會起紅斑點，請暫緩使用（光波產品療效大，應用範圍廣，在醫生指導下使用更佳）；
- 8、因血液流動加速，會感覺口渴，飲水會多些。